

# NITREX

## Eye Heat

取扱説明書

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

## ご使用前に必ずご確認ください

万が一、不足がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡下さい。

### セット内容

- 本体(アイマスク) ..... 1台
- 給電用USBコード ..... 1本
- 収納袋 ..... 1枚
- 取扱説明書 ..... 1部

※本製品は充電式ではなく、USBコードで給電しながら、加熱機能をご使用  
いただく仕様となっております。

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます。

## 安全上のご注意



### 警告

次の人は使用しないで下さい。

- 顔面の神経障害、皮膚知覚障、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方
- 骨折、整形などで顔面に埋め込み手術を受けた方
- 乳児、子供、お年寄りなど熱さを自覚できない方
- 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方
- 目の病気のある方、またはあった方
- 目の手術を行った方(レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談の上で使用下さい)

△事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合失明の原因になります。

下記の場合は使用しないで下さい。

- 体調のすぐれないときや発熱している場合
- 肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
- 皮膚に異常のある場合

△肌や身体のトラブルの原因になります。

乳幼児及び子供の手の届く場所には保管せず、使用させないで下さい。ペットには使用しないでください。

△事故やケガの原因になります。

ぬれた手でコネクターや端子部分に触らないでください。

△感電やけがの原因になります。

妊娠中の方は使用しないで下さい。

△ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。

湿気やほこりの多い場所で使用したり、保管しないで下さい。

また、水のかかりやすい所に置かないで下さい。

△感電や火災の原因になります。

分解、修理、改造はしないで下さい。

△火災・感電・けが・故障の原因になります。

アイマスク本体は、手洗いでのみ洗濯が可能です。USBコードは水につけたり、水洗いしないで下さい。

△感電やショートによる火災などの原因になります。

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下の車内など)で、保管・使用しないで下さい。

△発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。



## 注意

---

使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避けて下さい。

△火災・故障の原因になります。

連続加熱時間は30分間を超えないで下さい。

△ヤケドや肌トラブルの原因になります。

収納時にUSBコードを本体などに巻き付けないで下さい。

USBコードを抜くときは、コード部分を引っ張らずに必ず先端部分を持って下さい。

△感電やショートによる火災などの原因になります。

本体を装着中は他の作業をしないで下さい。

△思わぬ事故につながります。

コネクター部分、USBコード端子にピンなどの金属を差し込んだり、ごみを付着させたりしないでください。

△感電やショートによる火災などの原因になります。  
本体やUSBコードをたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえないでください。

△ケガや故障の原因になります。  
つけまつ毛は、必ずはずして下さい。

△目を傷つけたり炎症の原因になります。  
USBコードは付属のものを使用して下さい。  
付属のUSBコードは他の製品には使用しないで下さい。

△故障や事故の原因になります。  
睡眠時に遮光用のアイマスクとしてご使用される際には、USBコードを取り外してからご使用ください。

## 商品仕様


ブランド	MYTREX Eye Heat
品名	ホットアイマスク
本体寸法	約625×100mm
消費電力	3~4W
使用環境	温度 0℃~35℃、相対湿度 ≤85RH%
電源	DC 5V、1A (USBポートより給電)
タイマー	30分自動オフ
電源供給元	モバイルバッテリー／PC等のUSBポート




## 各部の名称

本体:表

面ファスナーテープ

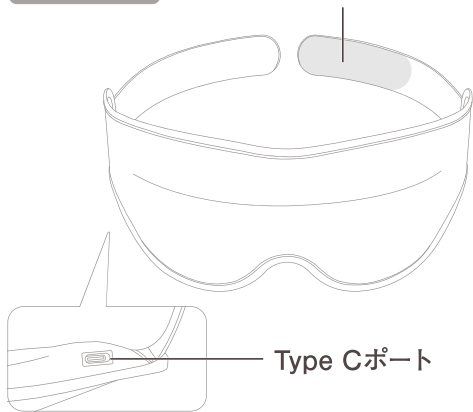


USBコード

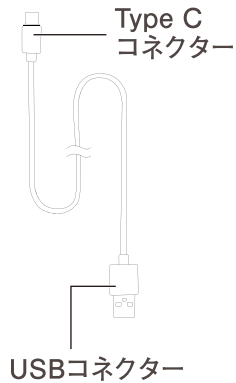

## ご使用方法


- 1 付属の給電用 USB コードの Type C コネクター側を、アイマスク本体の Type C ポートに接続し、USB コネクター側を電源供給元\*に接続します。

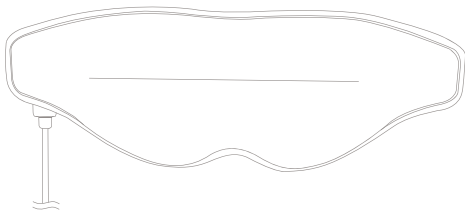

\* 電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプター等のUSBポート(5V/1A以上)をお使いください。

※加熱温度は、約40～42℃(装着時)です。外部環境によっては、温度に多少の誤差が生じます。

- 2 アイマスクを装着し、面ファスナーテープで留めます。
- アイマスク下部（ノーズワイヤー入）を指先で軽く押し、鼻のカーブに沿うようにフィットさせます。

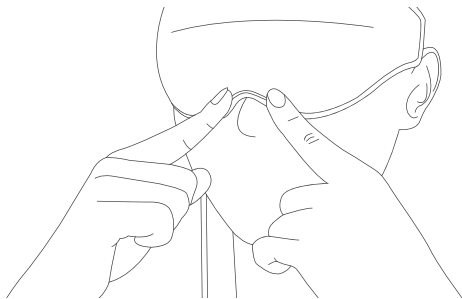

※USBコードを接続後、加熱し始めてから30分後に自動的に電源が切れます。  
途中で加熱を中止するには、USBコードを取り外してください。

- 3 ご使用後は、USB ケーブルをアイマスク本体、および電源供給元から取り外してください。
- 睡眠時に遮光用のアイマスクとしてご使用される場合は、USB コードを取り外してからご使用ください。

## お手入れのしかた

- 1 お手入れの際は、USB コードをアイマスクから取り外してください。
- 2 アイマスク本体の洗濯表示にしたがって、お手入れしてください。  
※USB コードは水に濡らさないでください。  
※アイマスク本体のUSB コードの差込口は、こすり洗いをしないでください。

- ・漂白剤、蛍光増白剤の含まれていない中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- ・移染することがありますので、濃色の物とのお洗濯はお避けください。
- ・色移りや変色の原因となりますので、長時間濡れたまま放置しないでください。
- ・洗濯後は竿などに掛け、形を整えた状態で陰干ししてください。
- ・タンブラー乾燥はお避けください。
- ・色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
- ・毛玉が発生する場合がありますので、お取り扱いにご注意ください。
- ・直射日光、高温多湿を避け、通気性のよい場所で保管してください。